

TÁJÉKOZTATÓ VEARA (VAGINÁLIS MIKROBIOM) VIZSGÁLATHOZ

A HÜVELYI MINTAVÉTEL FOLYAMATA



Nyissa ki a tasakot a nyíllal jelölt oldalról.

Vegye ki a fehér kupakos mintatároló csövet a csomagolásból.

Óvatosan nyissa ki a mintavételi pálcát tartalmazó tasakot. Ügyeljen arra, hogy a mintavételi szivacs ne érintkezzen semmivel.



Tartsa a törletvevő pálcát a pálcikaszár közepén.

Óvatosan helyezze be a mintavevő pálcát szivacsos végét a hüvelybe körülbelül 5 cm mélyre, és óvatosan forgassa 15 másodpercig. Győződjön meg arról, hogy a pálcát szivacsos vége megdörzsöli a hüvely falát, majd a mintavétel után húzza ki a törletvevő pálcát.



Óvatosan csavarja le a mintatároló cső kupakját anélkül, hogy hozzáérne a cső vagy a kupak pereméhez. A cső mintakonzerváló oldatot tartalmaz előre töltve, ügyeljen arra, hogy az oldat ne ömöljön ki.



Helyezze bele a mintavételi pálcát a szivacsos végével a mintatároló csőbe, majd törje bele a pálcát a műanyag száron jelzett töréspontnál, (egyik kezével tartsa a tároló csövet a másikkal pedig a pálcát, minimális erőfeszítéssel a pálcát magától eltörik a töréspont mentén).



Csavarja vissza szorosan a kupakot a mintatároló cső tetejére. Írja rá a minta adatait a csőre:

- Név vagy mintaazonosító, amellyel az eredményt közöljük.
- Életkor (év)
- Mintavétel dátuma

A mintát tartalmazó cső szobahőmérsékleten tárolható (5-25°C).

Kérjük, a minta mellé minden esetben csatolja a kitöltött vizsgálatkérő lapot.